

Nuestras prendas de compresión médica son examinadas frecuentemente por el Instituto de Investigación Hohenstein según las disposiciones de calidad y testado de la norma RAL-GZ 387

* CCLI =	18 – 21 mm Hg	2,4 – 2,8 kPa
CCLII =	23 – 32 mm Hg	3,1 – 4,3 kPa
CCLIII =	34 – 46 mm Hg	4,5 – 6,1 kPa
CCLIV =	al menos 49 mm Hg	al menos 6,5 kPa

- clase de compresión recomendada
- clase de compresión también disponible

\*CEAP = Clínica, Etiología, Anatomía, Patofisiología

<b>mediven elegance®</b>	<b>mediven® comfort</b>	<b>mediven® angio</b>	<b>mediven cotton®</b>	<b>mediven plus®</b>	<b>mediven® forte</b>	<b>mediven sensoo®</b>	<b>mediven mondi®</b>	<b>mediven ulcer kit</b>	<b>circaid juxtalite</b>
Las medias elegantes en muchos colores y estilos de moda. Disponibles en una amplia gama de tallas, incluyendo muslos extragrandes y dos longitudes.	Mejor nota: 1,0 en confort de uso, muy suave para poner y quitar fácilmente.	Suave acolchado de felpa en todo el pie. Costura especial de alivio de la presión en los dedos. Compresión efectiva y confortable.	Certificado de algodón orgánico y poliamida reciclada. Efecto termoregulador Dermatológicamente probado para pieles sensibles o alérgicas	Puntera abierta, material resistente y diseño opaco disponible en una amplia gama de tallas, incluyendo pantorrillas / muslos extragrandes y dos longitudes.	Estabilidad máxima de presión para un efecto profundo, también para indicaciones agudas.	El tejido suave para usuarios primerizos con edema hasta estadio I. Solo hecha a medida.	La gama de opciones para el edema crónico/linfedema. También disponible en una gama de tallas de puntera abierta del almacén.	sistema elástico de 2 capas de medias para la terapia de úlceras venosas – con tendencia al edema de leve a moderado	prenda de compresión inelástica para las personas que no son capaces de aplicar medias de compresión médicas o que tienen otras comorbilidades.

		Clases de compresión disponibles (CCL), RAL*																			
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	III	II	III	II	I	II	III	40 mmHg	20 – 50 mmHg	
Clasificación de Widmer	Clasificación CEAP	Síntomas clínicos	Objetivo de la compresión																		
	C0		Prevenición de hinchazón, pesadez en las piernas, sensibilidad al tacto y al dolor	●				●	●	●	●	●									
	C1		Prevenición de hinchazón, pesadez en las piernas, sensibilidad al tacto y al dolor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	CVII	C2	Venas varicosas; se distinguen de las arañas vasculares por el diámetro de 3 mm o superior	Prevenición de hinchazón, pesadez en las piernas, sensibilidad al tacto y al dolor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
	CVII	C3	Edema	Reducción del edema		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
	CVIII	C4	a) Alteraciones cutáneas y del tejido subcutáneo secundarias a afección venosa crónica, divididas en dos subtipos: Pigmentación o eczema b) Lipodermatosis o esclerosis o atrofia blanca	Prevenición de úlceras				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
	CVIIIa	C5	Úlcera venosa curada	Prevenición de reparación de la úlcera				●	●	●			●	●	●	●	●	●			●
	CVIIIb	C6	Úlcera venosa activa	Curación de la úlcera, alivio del dolor															●		●

Información importante: la elección de la prenda compresiva y la clase de compresión es responsabilidad del médico. La decisión depende en gran medida del paciente y sus necesidades individuales. Por ello, algunas recomendaciones se resaltan en gris.

PALMA

AV. D'ESTREN 27 - MANACOR  
T. 971 845 478 · 629 448 274  
HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8 A 20H  
WWW.ORTOPEDIA25.COM  
RMG.V3.2025



MANACOR

AV. D'ESTREN 27 - MANACOR  
T. 971 845 478 · 629 448 274  
HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8 A 20H  
WWW.ORTOPEDIA25.COM  
RMG.V3.2025

GOOGLE MAPS



PEDIR CITA PARA TOMA DE MEDIDAS



PALMA  
PÉREZ GALDÓS, 3A · PALMA  
T. 971 465 036 · 644 328 384  
HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 9 A 13 Y DE 16.30 A 20H.  
SÁBADO DE 10 A 13H.  
WWW.ORTOPEDIA25.COM